

Simbologia utilizada na rotulagem e embalagem.
Símbolos utilizados en lo rótulo y embalaje.
Symbols used at label and package.



Não reesterilize.
No vuelva a esterilizar.
Do not re-sterilize.



Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.
Producto de Uso Único. Prohibido Reutilizar.
Single Use Product. Prohibited Reprocessing.



Manter ao abrigo do sol.
Mantener protegido del sol.
Keep it protected from the sun.



Frágil, manuseie com cuidado.
Frágil, maneje con cuidado.
Fragile, handle it carefully.



Mantenha seco.
Guarde seco.
Keep dry.



Consulte instrução de uso.
Consulte la instrucción de uso.
Prior to use see enclosed on instruction.



Não utilizar se a embalagem estiver violada.
No utilice si el envoltorio esta violado.
Do not use if the package is breached.



LOT Número do lote / Código del Lote / Lot Number



Validade / Válido hasta / Expire date



FAB. = Data de Fabricação / Fecha de Fabricación / Manufacture Date.
EST. = Data de Esterilização / Fecha de esterilización / Sterilization date.



Face superior nesta direção.
Parte superior en esta dirección.
This way up.



Empilhamento máximo definido pelo número (cartucho).
Apilamiento máximo definido por el número (caja comercial).
Stacking limit by number (commercial box).



/ Ry = Estéril por Radiação Gama-Cobalto 60
Estéril por Radiación Gama / Sterile by Gamma Radiation.



/ ETO = Estéril por Óxido de Etileno
Esterilizado por Oxido de Etileno / Sterile by Ethylene Oxide.

ATENÇÃO: A esterilidade é assegurada por um prazo igual à validade do produto, salvo se a embalagem estiver danificada, violada, aberta ou molhada.

ATENCIÓN: Se garantiza la esterilidad del producto por un periodo igual a la validez del producto a no ser que el empaque este dañado, abierto o mojado.

ATTENTION: The sterility is guaranteed by a period equal to validity of product, unless the packing is damaged, violated, opened or wet.

Recomenda-se manter a temperatura entre 15°C e 30°C.
Se recomienda guardar en la temperatura entre 15°C y 30°C.
It is recommended to keep in temperature between 15°C to 30°C (59°F to 86°F).

REG. = Registro / Registro / Register
ABS. = Absorvível / Absorbible / Absorbable
N. ABS. = Não Absorvível / No Absorbible / Non Absorbable
S. AG. = Sem agulha / Sin aguja / No needle
C. AG. = Com agulha / Con aguja / With needle

PONTA DA AGULHA / PUNTA DE AGUJA / NEEDLE POINT

- Cilíndrica / Cilindrica / Taper point ▼ Triangular / Triangular / Reverse cutting
● Ponta roma / Punta Roma / Blunt point ▽ Espátula / Espátula / Spatula

PROIBIDO REPROCESSAR. REPROCESAMIENTO PROHIBIDO. PROHIBITED REPROCESSING.

Responsável Técnico / Responsable Técnico / Technical Responsible:
MARINA GIL CORSI - CRF/SP 94.142



BRASUTURE
SUTURAS CIRÚRGICAS

BRASUTURE IND. COM. IMP. EXP. LTDA.

www.brasuture.com.br

sac@brasuture.com.br

INSTRUÇÃO DE USO DA SUTURA DE AÇO MONOFILAMENTO

SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL

DESCRIÇÃO

A Sutura de Aço Monofilamento é uma sutura cirúrgica monofilamentar, sintética, estéril, não-absorvível, composta de aço inoxidável 316L. A Sutura de Aço Monofilamento atende às especificações estabelecidas para Sutures Cirúrgicas Não Absorvíveis pela Farmacopéia Brasileira, pela United States Pharmacopoeia (USP), pela Farmacopéia Europeia (EP) e pela norma ABNT NBR 13904/03 – “Fios para Sutures Cirúrgicas”. A Sutura de Aço Monofilamento é esterilizada por Irradiação Gama (Cobalto 60) ou Oxido de Etileno. A Sutura de Aço Monofilamento atende a todos os requisitos estabelecidos pelas normas acima citadas, no que se refere a suturas cirúrgicas não absorvíveis, a não ser para o seguinte diâmetro:

VARIACÃO MÁXIMA DO DIÂMETRO DA SUTURA (mm)	
Indicação do tamanho da sutura - Nº cirúrgico	Variacão Máxima em mm
5	0,001

INDICAÇÃO

A Sutura de Aço Monofilamento é indicada para fechamento de feridas abdominais, restauração de hérnias, fechamento esternal e procedimentos ortopédicos, incluindo casos de envolvimento ósseo e restauração dos tendões. A Sutura de Aço Monofilamento Não Agulhada é indicada para amarração em procedimentos buco-maxilo-facial, podendo ser utilizada em procedimento de neuro cirurgia e ortopedia.

ACÃO

A Sutura de Aço Monofilamento desencadeia uma reação inflamatória aguda mínima nos tecidos e não é absorvível.

CONTRA-INDICAÇÃO

O uso desta sutura é contra-indicado para pacientes que apresentem reconhecida sensibilidade ou alergia ao aço inoxidável 316L ou aos metais componentes, tais como o cromo e níquel.

CUIDADOS

Os usuários devem estar familiarizados com os procedimentos e técnicas cirúrgicas que envolvam as suturas não-absorvíveis antes de utilizar a Sutura de Aço Monofilamento para o fechamento de incisões, pois o risco da deiscência da ferida pode variar de acordo com o local da aplicação e o material de sutura utilizado. A sutura só deverá ser utilizada por ou sob orientação de cirurgião segundo técnicas cirúrgicas aplicáveis e só deverá ser manipulado por pessoal qualificado. Não usar a sutura para outros fins que não aqueles recomendados pelo fabricante. Cuidados devem ser tomados para que a manipulação dessa sutura seja feita de modo asséptico. As práticas cirúrgicas aceitáveis devem ser seguidas para o cuidado de feridas infeccionadas ou contaminadas. Não re-esterilizar. Descartar as embalagens abertas e não utilizadas. Descartar sobras. Não utilizar se a embalagem estiver violada ou molhada. Não utilizar o produto além do prazo de validade. Descarte de suturas utilizadas: Perigo de contaminação biológica - adotar medidas internas de descarte, considerando o risco de contaminação biológica. Descarte de suturas utilizadas ou não utilizadas: Material perfurante e cortante - adotar medidas internas de descarte para materiais perfurantes e cortantes.

PRECAUÇÕES

Na manipulação desta ou qualquer outro material de sutura cirúrgica, cuidados devem ser tomados para não danificar a sutura. Evitar o dobramento e esmagamento das agulhas pelo manuseio inadequado de pinças e porta agulhas. Agulhas quebradas podem provocar o prolongamento das cirurgias, cirurgias adicionais ou permanência de corpo estranho no organismo. É recomendado que os usuários tenham cuidado ao manusear as agulhas cirúrgicas para evitar perfurações indesejáveis, pois agulhas contaminadas podem causar a transmissão de patógenos através do sangue. Descartar as agulhas usadas em recipientes próprios para materiais potencialmente contaminados.

USO

Utilizar a quantidade de sutura necessária, de acordo com a extensão da ferida cirúrgica e técnica adotada pelo cirurgião. O tamanho e o diâmetro da sutura e a agulha utilizada para cada tipo de intervenção cirúrgica são definidos por critério médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Os efeitos adversos associados ao uso desta sutura incluem: deiscência da ferida; perda gradual de toda força tênsil com o decorrer do tempo; reação alérgica em pacientes com reconhecida sensibilidade ao aço inoxidável 316L ou aos metais componentes, tais como o cromo e níquel; infecção; reação inflamatória mínima do tecido; dor, edema e irritação no local da ferida.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene e transporte o produto em sua embalagem original, entre as temperaturas de 15°C a 30°C, ao abrigo de luz solar direta, fontes de calor, umidade e livre de poeira.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Sutura de Aço Monofilamento é apresentada em sua cor natural, em envelopes estéreis, nos diâmetros U.S.P 7-0 até 5 (métrico 0,7 até 9). A sutura é apresentada em determinados comprimentos, sem agulha ou encastada a 1 ou 2 agulhas atraumáticas, de acordo com procedimento cirúrgico a ser utilizada; em caixas com 12, 24 ou 36 unidades.

VALIDADE

Cinco anos após a data de fabricação. Vide caixa e envelope.

CAIXA COM 12(DOZE), 24(VINTE E QUATRO) OU 36(TRINTA E SEIS) ENVELOPES
PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO REESTERILIZE - DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS
E NÃO UTILIZADOS - ESTÉRIL - PROIBIDO REPROCESSAR - DESTRUIR APÓS O USO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:

RADIAÇÃO GAMA (COBALTO 60) OU ÓXIDO DE ETILENO

BRASUTURE IND. COM. IMP. EXP. LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA / MARCA REGISTRADA
Rua Vereador José Vasconcelos dos Reis, n.º 642 - Distrito Industrial
CEP 13790-000 - São Sebastião da Gramma - SP - Brasil
CNPJ 02.370.649/0001-20 - Fábrica: Tel.: 55 19 3646-7300
Responsável Técnico: MARINA GIL CORSI - CRF/SP 94.142

REGISTRO ANVISA N.º:

AÇO MONOFILAMENTO SEM AGULHA: 10372360019
AÇO MONOFILAMENTO COM AGULHA: 10372360007